

# Herzstarter in Ferring

Der Herzstarter befindet sich neben dem Eingang des Ladens und

**Gåskærvej 82 Ferring.** Alle haben Zugang zu diesem!

Falls man den Herzstarter benötigt und nicht mit einen der unten aufgeföhrten Personen in Kontakt kommen kann, muss der Herzstarter selbst geholt werden. In diesem Falle darf das Fenster des Schrankes, in welchem sich der Herzstarter befindet, eingeschlagen werden. Der Herzstarter kann nicht falsch angewendet werden.

Kontaktpersonen, welche in dem Gebrauch des Herzstarters geschult wurden!

Bild 2: Hat die Person einen Herzstillstand erlitten?  
Freie Luftwege schaffen. Sehen, föhlen und die Atmung abhören.

Atmet die Person nicht normal, konnte dies evt!. ein Herzstillstand bedeuten!

Bild 3: Hilfe antordern!  
Alarm - wahlen Sie 1-1-2

Bild 4: Den Herzstarter holen  
Finden Sie den roten Behälter auf welchem ein Herz mit Blitz abgebildet ist!

Bild 5: Falls der Herzstarter nicht am Platz ist, erteilen Sie eine Herz-Lungen-Rettung  
30.x dröcken ..... und 2 x blasen

Bild 6: Den Herzstarter einschalten  
Ziehen sie an dem Handgriff und der Herzstarter gibt Anweisungen was zu tun ist!

Bild 7: Folgen Sie den Anweisungen des Herzstarters  
Hörehen Sie genau und  
-Schneiden Sie die Kleidung aut  
-Setzen Sie die Elektroden, wie beschrieben, aut  
-Die Person darf nicht beröhrt werden

Bild 8: Der Herzstarter untersucht den Zustand des Herzens

Bild 9: Den Anweisungen des Herzstarters folgen  
Der Herzstarter urteilt selbst ob Elektroschock ausgelöst werden soll oder nicht  
(Alle sollen Abstand halten, wenn Elektroschock erforderlich ist)